

**mChoice: Improving PrEP Uptake and Adherence among Minority MSM through
Provider Training and Adherence Assistance in Two High Priority Settings**

**Attachment 4d
CleverCap App Setup Spanish**


La carga pública de notificación para esta recolección de información se calcula que promedia los 10 minutos por respuesta, lo que incluye el tiempo que se toma en dar las instrucciones, hacer búsquedas en fuentes de datos, recolectar y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. Una agencia no puede llevar a cabo ni patrocinar un estudio de recopilación de información y las personas no están obligadas a responder, a menos que se presente un número de control de OMB válido y vigente. Envíe comentarios sobre este cálculo de tiempo o sobre cualquier otro aspecto de esta recolección de información, incluidas sugerencias para reducir esta carga, a CDC/ATSDR Reports Clearance Officer, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; ATTN: OMB-PRA (0920-Nuevo).

mChoice CleverCap Guía de Inducción

A continuación, se muestra la pantalla de bienvenida de la aplicación. Los participantes deben presionar "Inicie sesión" en la pantalla inicial. Su cuenta sería configurada antes de su inscripción, y las credenciales se enviarán a su correo electrónico. Un miembro del equipo de estudio ayudará al participante a iniciar sesión en la aplicación y familiarizarse con ella.




A continuación, se muestra la barra de menú lateral. Al tocar las tres líneas en la parte superior derecha de la pantalla, los participantes pueden navegar a "Panel de control", "Mis alarmas", "Mi Adherencia", "Mi cuenta", "Ayuda", "Opciones", " Chat", "Videos e información" (todo explicado en detalle a continuación), o pueden cerrar sesión.

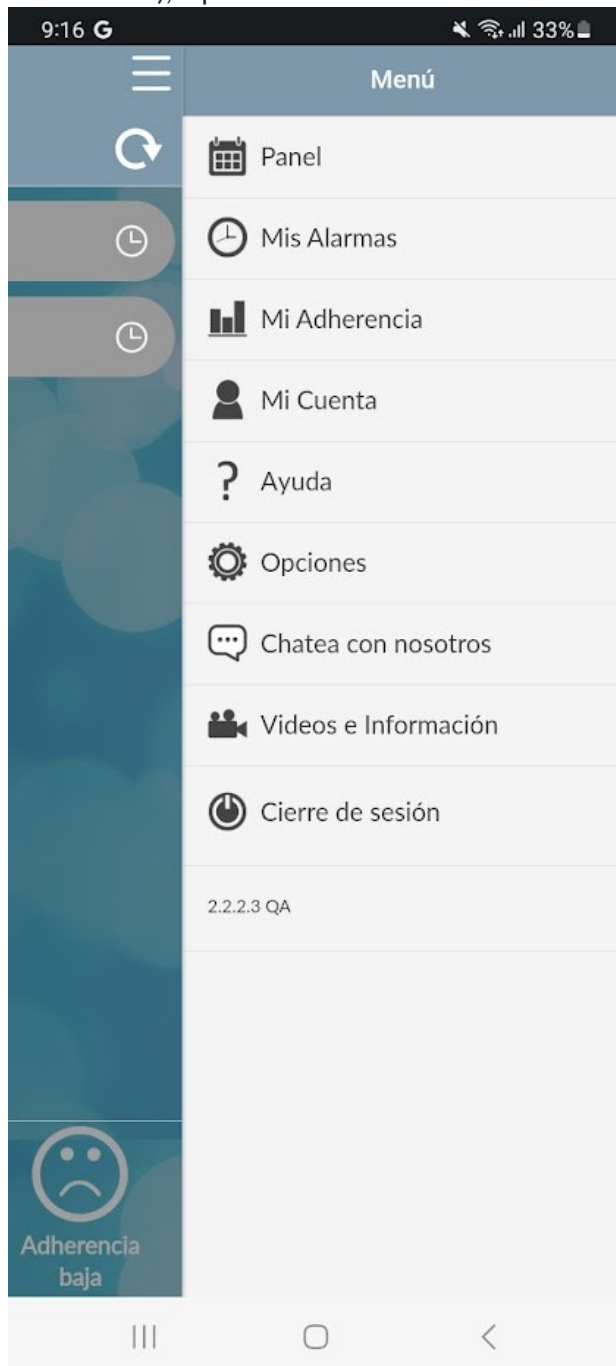

Página del panel

La "Página del panel" es la página de inicio de la aplicación CleverCap. Aquí, los participantes pueden ingresar su actividad sexual y registrar manualmente que tomaron su medicamento. El tablero muestra las dosis pendientes, tomadas, perdidas o fuera de horario.

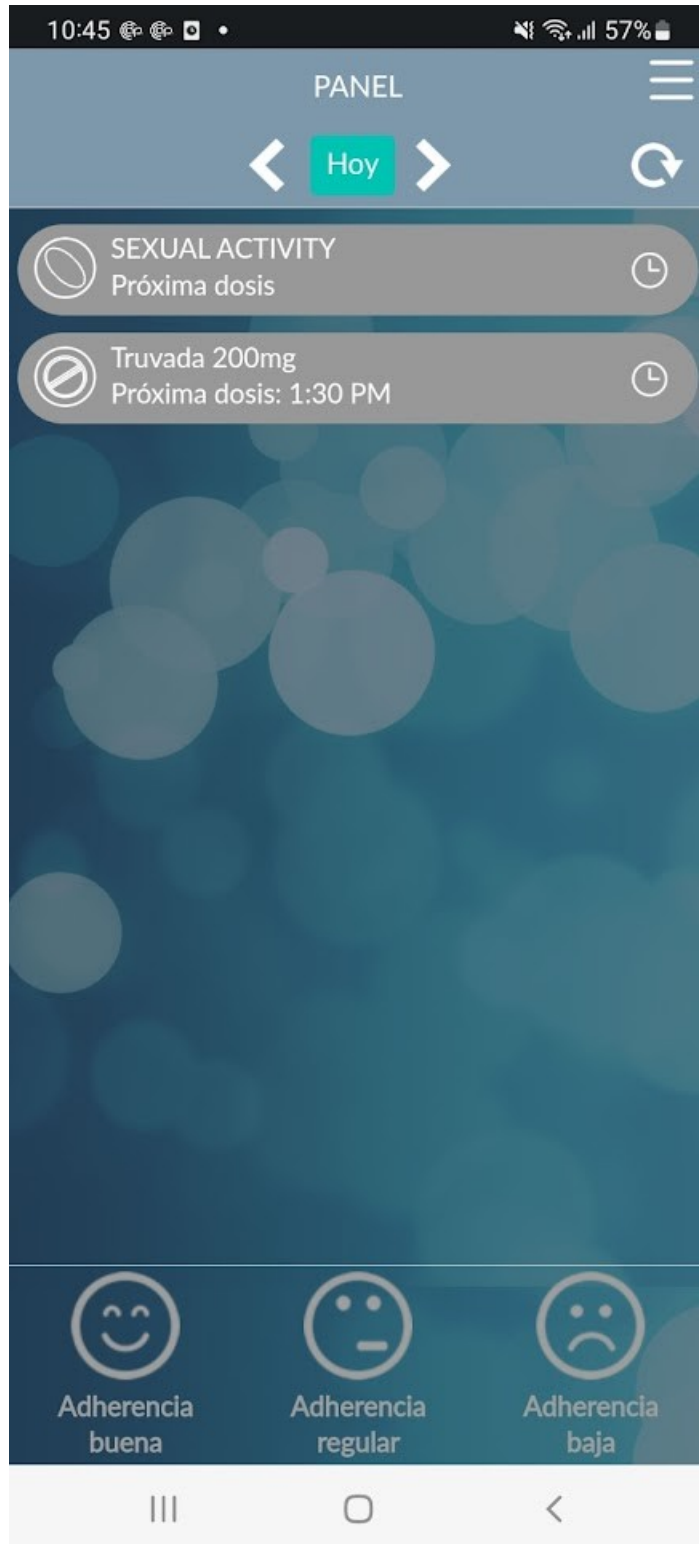

Actividad Sexual

Al presionar en "Agregar evento" en la página de "Actividad sexual", los participantes pueden ingresar información de actividad sexual reciente. Aparecerán las preguntas que se muestran a continuación. Para los participantes que usan el régimen de PrEP a demanda, el registro de una instancia de actividad sexual activará recordatorios para que los participantes tomen sus dosis subsiguientes de 2-1-1.

PANEL

← Hoy →


SEXUAL ACTIVITY
Próxima dosis:

mChoice Medication
Próxima dosis: 1:30 PM

Adherencia buena Adherencia regular Adherencia baja

PrEP Sexual Activity

Actividad para el Martes, 23 de mayo de 2023



Partner Gender / Género de la pareja

- Male (cisgender) / Hombre (cisgénero)
- Male (transgender) / Hombre (transgénero)
- Female (cisgender) / Mujer (cisgénero)
- Female (transgender) / Mujer (transgénero)
- Other / Otro
- N/A / N/A
- Rather not say / Prefiero no decir

Partner HIV status / Estado de VIH de la pareja

- Positive / Positivo
- Negative / Negativo
- I don't know / No sé


Is your partner taking PrEP? / ¿Su pareja está tomando PrEP?

- Yes / Sí
- No / No
- I don't know / No sé

Did you use a condom? / ¿Usó un condón?

- Yes / Sí
- No / No


Una vez que se agrega un evento, los participantes tendrán la opción de ver el evento o eliminarlo.

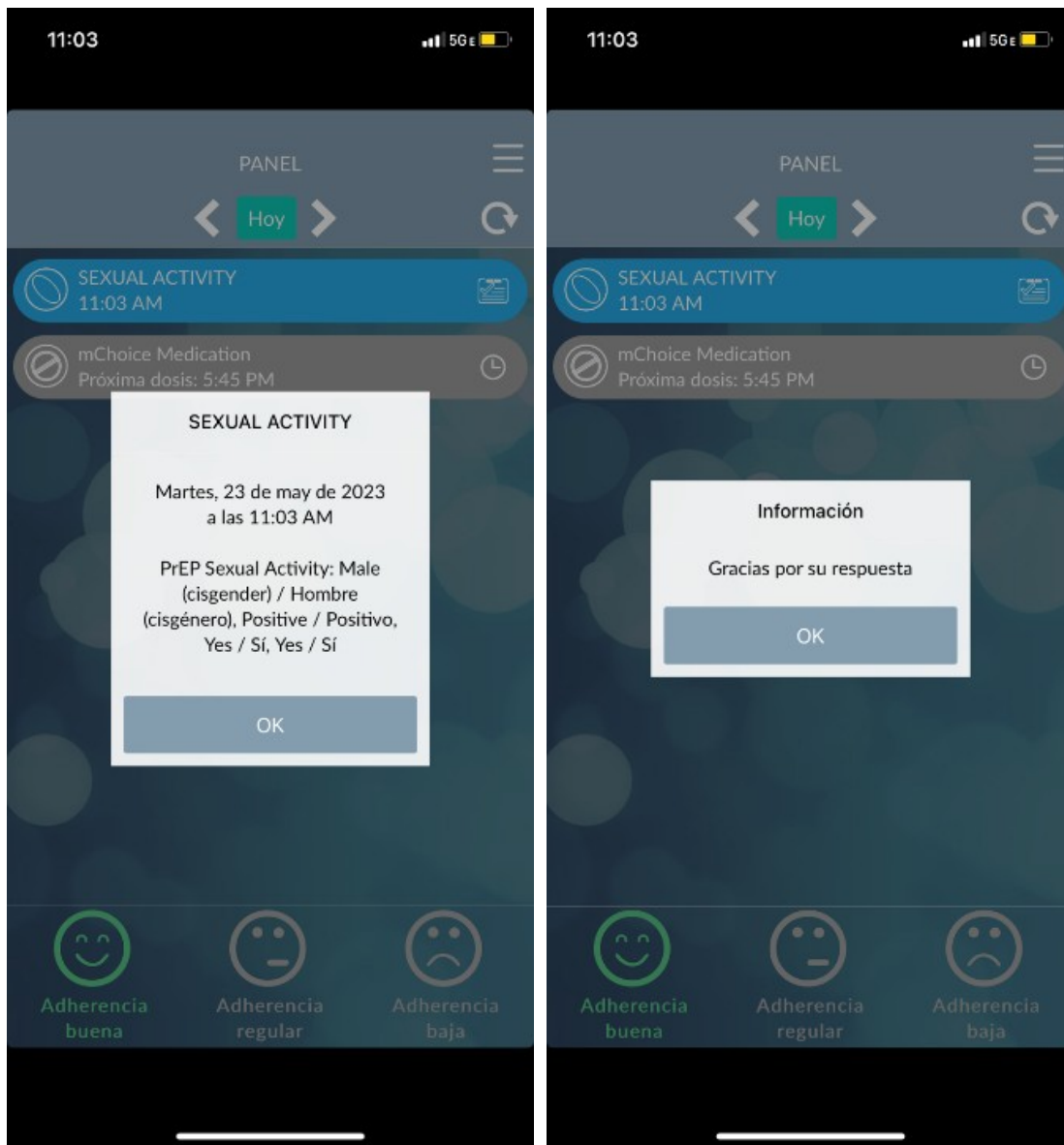

Mensaje pop-up sobre PEP (Para los participantes que usan el régimen de PrEP a demanda)


Los participantes que no tomaron o registraron 2 píldoras antes de participar o documentar la actividad sexual verán el siguiente mensaje:

“La profilaxis posterior a la exposición (PEP) es un medicamento para prevenir el VIH después de una posible exposición. Si cree que podría haber estado expuesto al VIH, comuníquese con su proveedor de atención médica. La PEP debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a la exposición al VIH.”

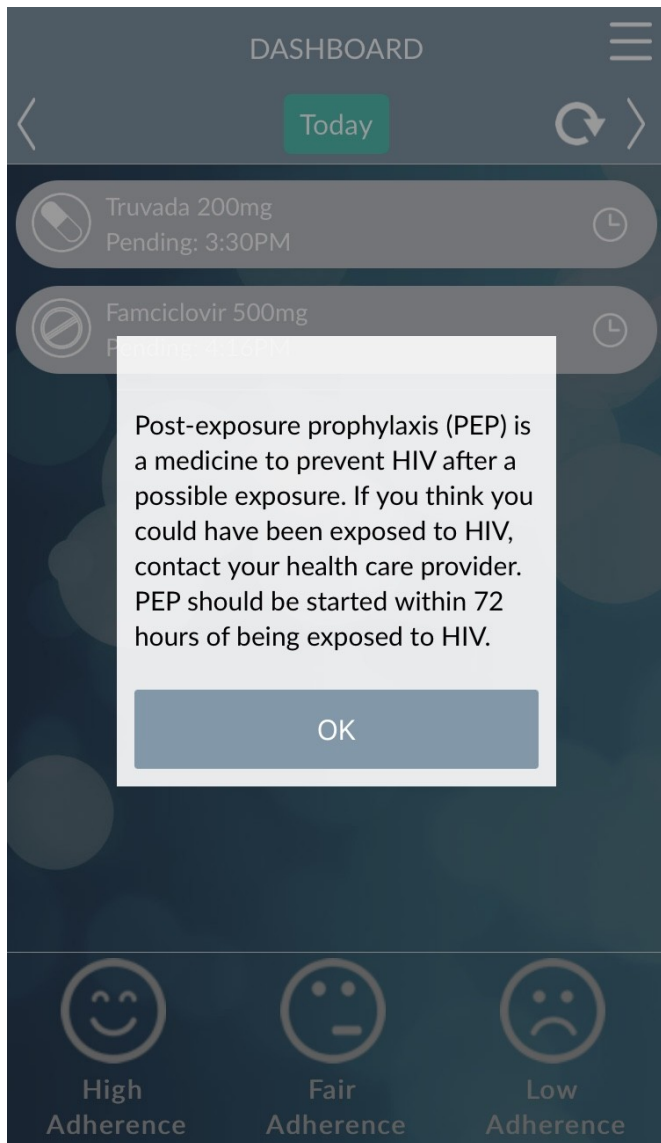

Dosis

Al presionar el medicamento/dosis, los participantes pueden ingresar que han tomado su medicamento o ver más información sobre el medicamento.

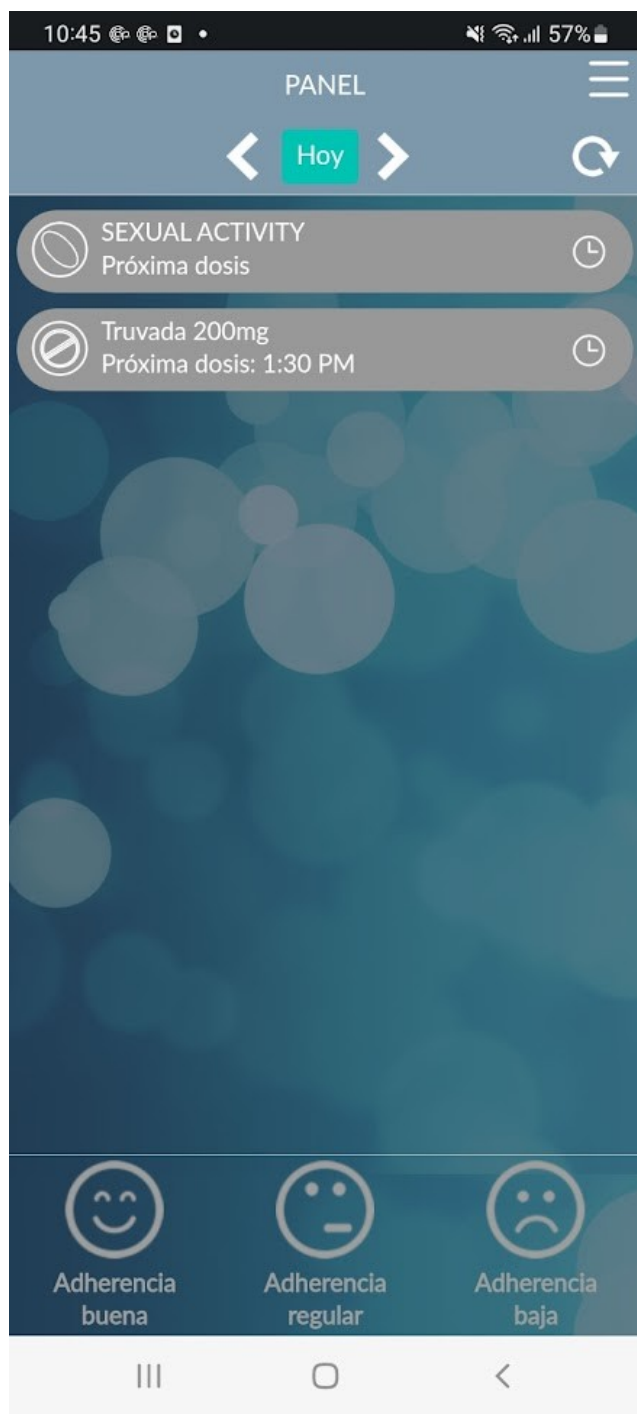

Información sobre medicamentos

La página "Información del Fármaco" de la aplicación CleverCap muestra detalles de los medicamentos del participante, como sugerencias, efectos secundarios y cuándo comunicarse con un proveedor de atención médica.



Mis alarmas

La página "Mis alarmas" permite a los participantes agregar configuraciones de alerta por presionar en "Agregar alarma" (consulte la página 10).




No hay Alarmas asociadas con su cuenta

Recibe notificaciones acerca del uso de su
Medicamento.



Agregar Alarma

En la página "Agregar alarma", los participantes pueden personalizar sus alertas y optar por notificar a un miembro del equipo del estudio sobre la dosificación o la falta de una dosis del medicamento, es decir, si tomaron su medicación fuera del horario previsto o si se saltaron una dosis.

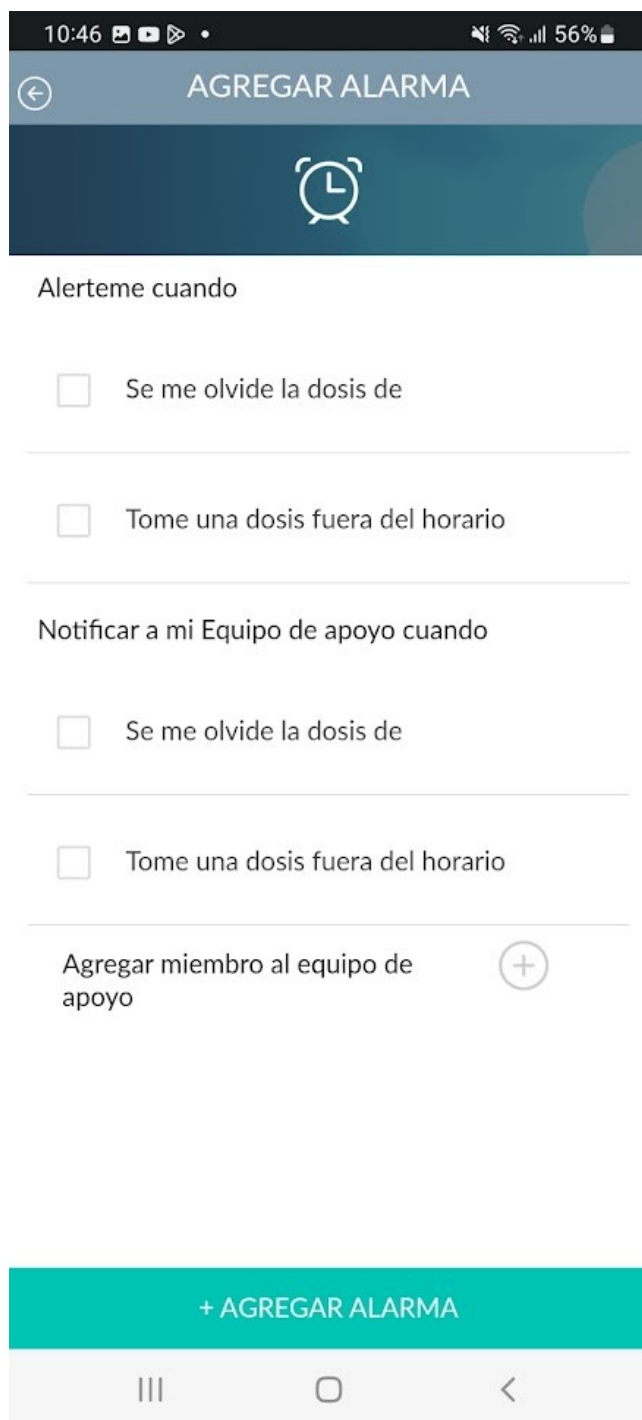

10:46 56%

← AGREGAR ALARMA

🕒

Alerteme cuando

Se me olvide la dosis de

Tome una dosis fuera del horario

Notificar a mi Equipo de apoyo cuando

Se me olvide la dosis de

Tome una dosis fuera del horario



⊕
Agregar miembro al equipo de apoyo

+ AGREGAR ALARMA

||| ○ <

Mis estadísticas

La página “Mi adherencia” muestra los datos del uso mensual.

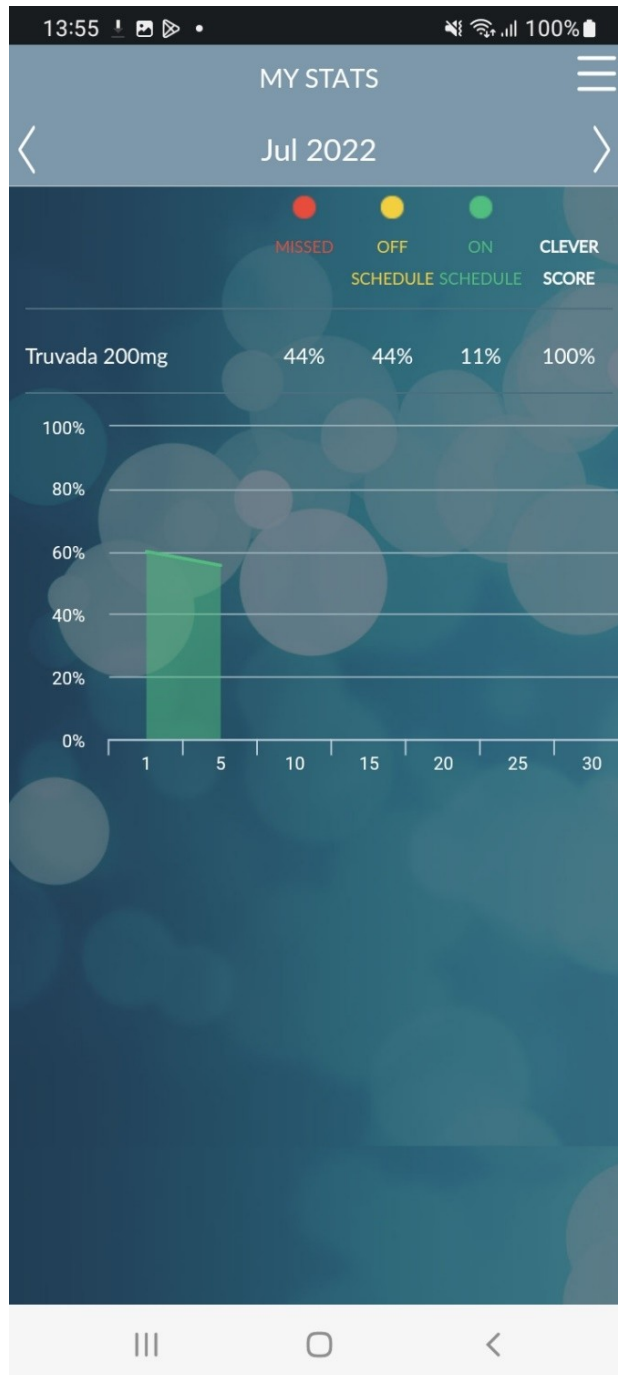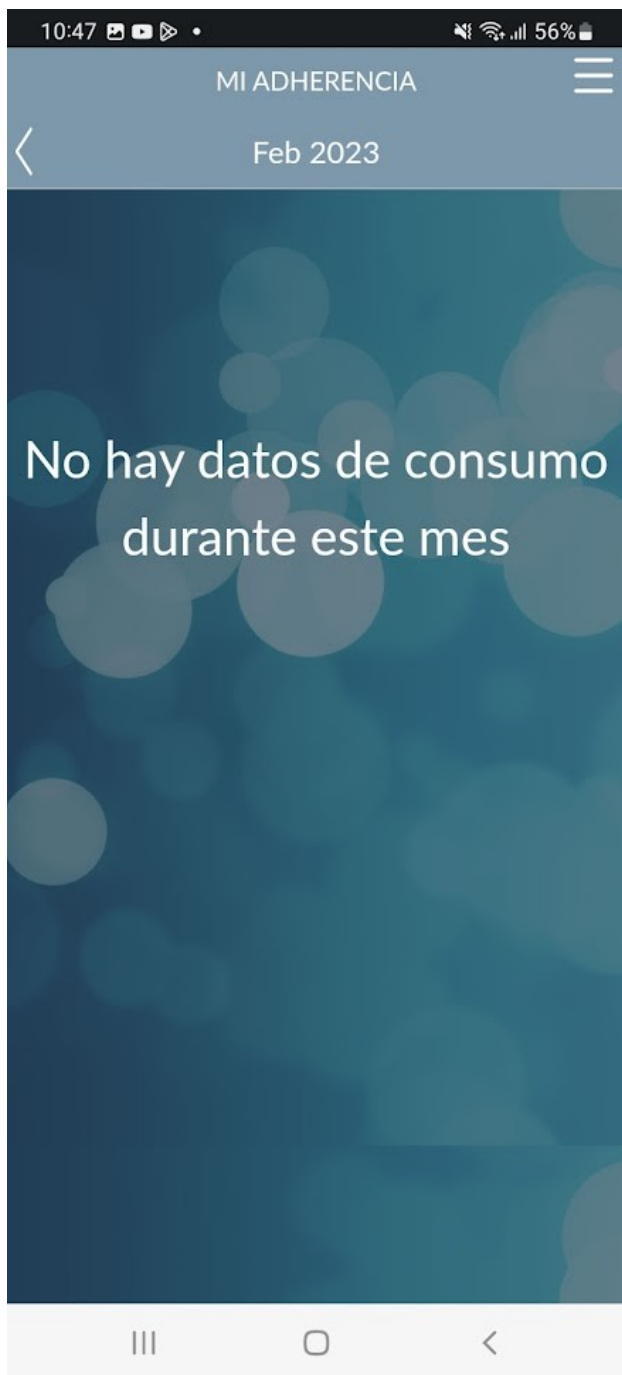

Mi cuenta

La página de “Mi cuenta” muestra detalles de la cuenta del participante, tales como nombre de usuario, nombre y correo electrónico. En esta página, los participantes pueden editar su información de la cuenta (excluyendo el nombre de usuario) o su contraseña.



The screenshot shows a mobile application interface for account management. At the top, there is a status bar with the time 10:47, signal strength, Wi-Fi, and 56% battery. Below that is a header bar with the text "MI CUENTA" and a hamburger menu icon. The main content area displays account details in a list format, with each item consisting of a label and a value, separated by a horizontal line. The details are: USUARIO: mchoice01; NOMBRE: Subject 01; APELLIDOS: mChoice; PAÍS: USA; ZONA HORARIA: America/New_York; TELÉFONO: (empty field); CORREO ELECTRÓNICO: mb4953@cumc.columbia.ed. At the bottom, there is a navigation bar with two buttons: "EDITAR" (grey) and "CAMBIAR CONTRASEÑA" (teal). Below the navigation bar is an Android-style bottom navigation bar with three icons: a vertical bar, a circle, and a left-pointing arrow.


| | |
|--------------------|-------------------------|
| USUARIO | mchoice01 |
| NOMBRE | Subject 01 |
| APELLIDOS | mChoice |
| PAÍS | USA |
| ZONA HORARIA | America/New_York |
| TELÉFONO | |
| CORREO ELECTRÓNICO | mb4953@cumc.columbia.ed |

EDITAR CAMBIAR CONTRASEÑA

III O <


Ayuda

La página “Ayuda” contiene un enlace a Preguntas Frecuentes y números de teléfono de soporte.

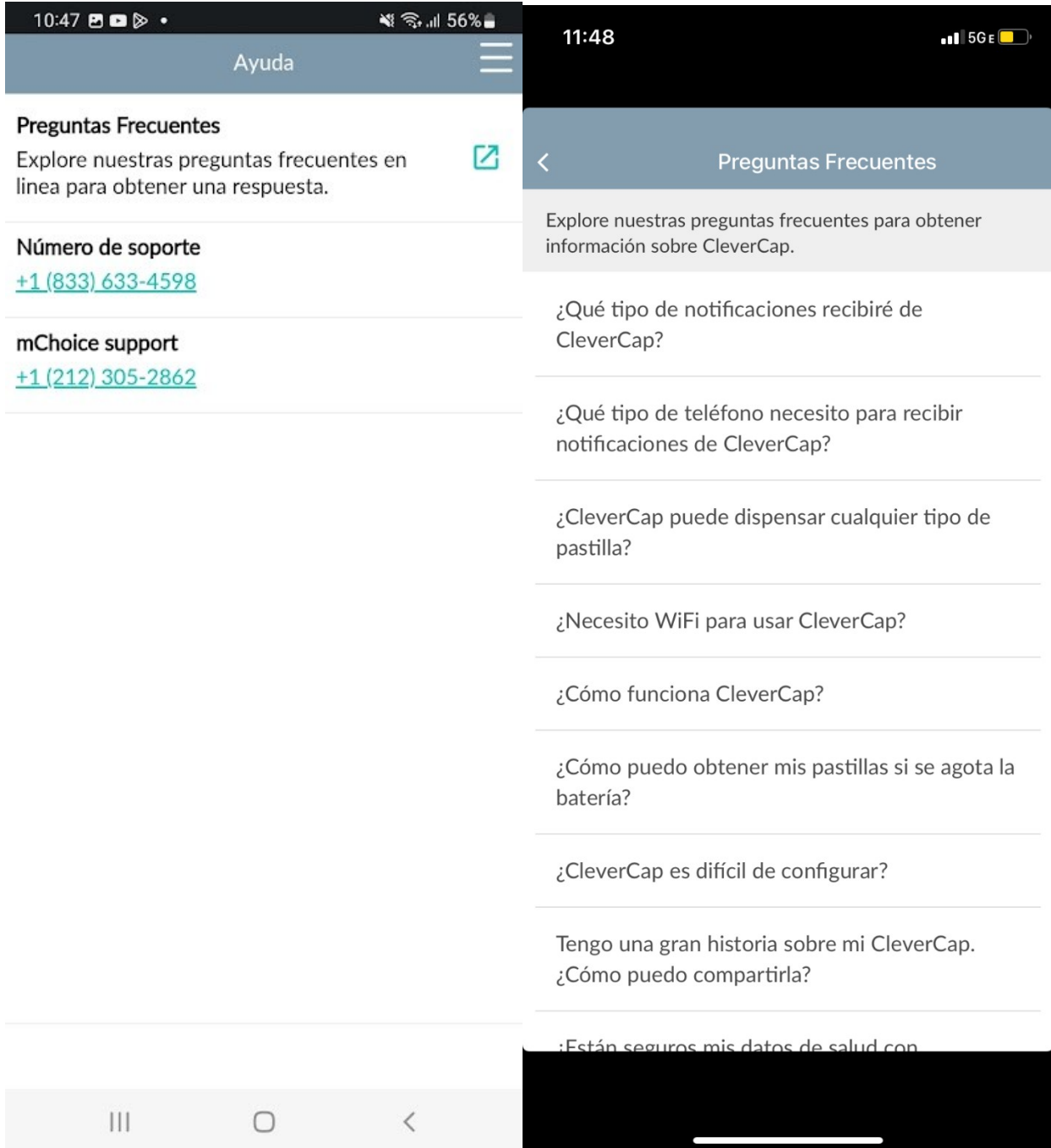

Opciones

La página de “Opciones” permite a los participantes que programen recordatorios o cuando tomar sus medicamentos o seleccionar el lenguaje de inglés o español como idioma en la aplicación.

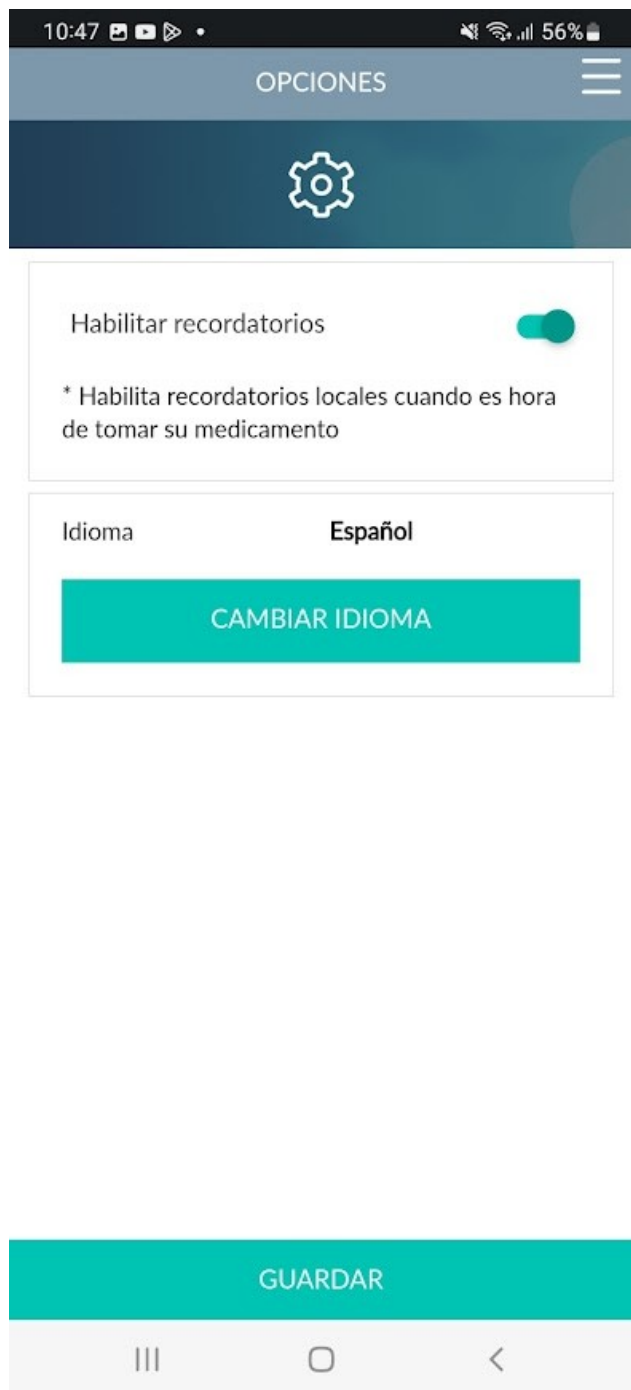

Chat

La página de "Chat" permite a los participantes comunicarse con el equipo del estudio con preguntas o preocupaciones



Videos e información

La página de “Videos e información” contiene enlaces y videos de la CDC e información relacionada con VIH, y también información sobre profilaxis preexposición (PrEP) y profilaxis posterior a exposición (PEP).

